

**FAIR
SQUARED**



Period Cup

*Die Menstruationstasse aus fair gehandeltem Naturkautschuk
Eine Alternative aus natürlichen Rohstoffen*



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

KOMFORT UND ZUFRIEDENHEIT

- Über die Hälfte der Menstruierenden empfinden die Menstruationstasse komfortabler als Tampons und Binden*
- Bei der Verwendung von Menstruationstassen entsteht deutlich weniger Trockenheit und Geruch*
- Mehr als 60 Prozent der Menstruierenden sind eher unzufrieden mit Tampons und Binden*

ÖKOLOGIE UND ÖKONOMIE

- Menstruierende verwenden im Leben rund 10.000 Tampons oder Binden. Mit einer Menstruationstasse kann der Abfall von Tampons und Binden maßgeblich reduziert werden.
- Dank der langen Haltbarkeit von mehr als fünf Jahren ist die Menstruationstasse günstiger als Tampons oder Binden.
- Warum werden die meisten heute angebotenen Menstruationstassen eigentlich aus Plastik oder Silikon hergestellt, wenn es eine Alternative gibt? **Die FAIR SQUARED Period Cup ist seit 2017 weltweit die einzige Menstruationstasse, die aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird** und in vier Größen erhältlich ist.

* QUELLE:

„Preclinical, Clinical, and Over-the-Counter Postmarketing Experience with a New Vaginal Cup: Menstrual Collection“
in JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH, Volume 20, Number 2, 2011



UNSER ANGEBOT

Produkte	Art.nr.	VE	EAN Code	Vol.	Ø	Verpackungsmaße
Period Cup Size S	4910277	8	4260365856131	8 ml	38 mm	50 x 50 x 156 mm
Period Cup Size M	4910036	8	4260365851587	13 ml	41 mm	50 x 50 x 156 mm
Period Cup Size L	4910167	8	4260365854007	16 ml	44 mm	50 x 50 x 156 mm
Period Cup Size XL	4910278	8	4260365856162	20 ml	47 mm	50 x 50 x 156 mm

WEM PASST WELCHE GRÖSSE?

Größe	Empfehlung
S	sehr leichte Blutung
M	Geburten nein, < 30 Jahre
L	Geburten ja, > 30 Jahre
XL	mittlere bis sehr starke Blutung

INHALT EINER PACKUNG

- FAIR SQUARED Period Cup
- Fairtrade-Stoffbeutel zur Aufbewahrung
- Gebrauchsanweisung



ARGUMENTE

Die Period Cup von FAIR SQUARED ist eine weiche Menstruationstasse, hergestellt aus fair gehandeltem Naturkautschuk. Sie saugt das Blut nicht auf, sondern sammelt es. Sie ist für schwache und starke Tage geeignet, denn sie fasst drei mal mehr als ein regulärer Tampon und gibt länger anhaltenden Schutz. Die Period Cup wird wiederverwendet, lässt sich mit Wasser leicht reinigen und ist bei geübter Anwendung nicht spürbar. Im Gegensatz zu Menstruationstassen aus Silikon oder Kunststoff ist die Period Cup ein aus umweltfreundlichem Material hergestellter Hygieneartikel.

- Hergestellt aus FSC® zertifiziertem Naturkautschuk
- Biologisch abbaubar
- Frei von Plastik, Silikon, BPA, PVC, Phthalaten oder Bleichmitteln
- 100 % fair gehandelter Naturkautschuk
- Jede Period Cup wird mit einem Stoffbeutel aus fairem Handel für unterwegs geliefert



- Erhältlich in den Größen S, M, L und XL
- Mehrsprachige Verpackung (DE/EN/FR/IT) aus FSC-zertifiziertem Karton
- Bietet bis zu 12 Stunden Schutz, ideal für die Nacht
- Hinterlässt keine Trockenheit und keine Fusseln
- Von der Vegan Society zertifiziert als veganes Produkt

Naturkautschuk (Latex) ist ein nachwachsender Rohstoff mit sehr guten Materialeigenschaften, aus dem auch Kondome, Luftballons, Schnuller und Handschuhe gefertigt werden.

Die Period Cups werden aus fair gehandeltem Naturkautschuk der Horana Plantage auf Sri Lanka hergestellt.

FAIR SQUARED ist Mitglied der Fair Rubber Association, d.h. wir zahlen zusätzlich eine Fair Trade Prämie, die zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Plantagenarbeiter und ihrer Familien dient. Die Arbeiter und Arbeiterinnen in Horana entscheiden selbst, für welche Projekte die Fair Trade Prämie genutzt wird.



ABBAUBARKEIT DES FAIR SQUARED PERIOD CUP AUS NATURKAUTSCHUK

Übrigens – wussten Sie, dass ein Naturkautschukluftballon aus unserem Sortiment sich in der Umwelt mit etwa der gleichen Geschwindigkeit zersetzt wie ein Eichenblatt? Dabei wirken die verschiedenen Einflüsse von Sonnenlicht, Sauerstoff und Ozon, Bewitterung, bakteriologische Zersetzung sowie natürliche Alterung auf das natürliche Material ein. Das gleiche Prinzip gilt auch für unseren Period Cup. Daher ist Naturkautschuk wahrlich eine echte (und altbekannte, aber leider vergessene) Alternative zu Plastik.

WARUM NATURKAUTSCHUK DIE BESTE ALTERNATIVE ZU KUNSTSTOFF IST

Nicht erst seit gestern dreht sich beim Thema Kunststoff vieles um die Suche nach geeigneten alternativen Materialien. Mit zunehmendem öffentlichen Bewusstsein für die ökologischen Folgen des weltweiten Konsums werden Forderungen nach umweltverträglicheren Lösungen für die zahlreichen Anwendungsgebiete des synthetischen Polymers laut. Wir sind davon überzeugt, dass mit Naturkautschuk, der aus dem Milchsaft (Latex) des Gummibaums *Hevea Brasiliensis* gewonnen wird, ein Material vorhanden ist, das sich schon seit langem als geeignetes Material für zahlreiche Anwendungen bewährt hat.

ÖKOLOGISCHE VORTEILE VON NATURKAUTSCHUK

Bei Naturkautschuk handelt es sich um ein nachhaltiges Material, da es aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird und biologisch abbaubar ist. Darüber hinaus ist der Kautschukbaum gut für das Klima, da er im Vergleich zu anderen Bäumen ein Vielfaches der CO₂-Speicherkapazität aufweist. In einigen Studien spricht man von einer 4,7-fach höheren Kapazität als der von tropischem Regenwald. Zudem existieren bereits jetzt FSC®-zertifizierte Kautschukplantagen, die aufgrund ihrer nachhaltigen Forstwirtschaft zertifiziert wurden.

STUDIEN ZUR ABBAUBARKEIT VON NATURKAUTSCHUKPRODUKTEN

Auch wenn zum Haltbarmachen – der Vulkanisation – dem Naturkautschuk bestimmte Stoffe beigefügt werden, konnten Studien mit Hygienhandschuhen folgendes Ergebnis liefern: Im Vergleich zu solchen aus synthetischen Stoffen weisen Handschuhe aus Naturkautschuk eine höhere biologische Abbaubarkeit auf. Innerhalb des Untersuchungszeitraums von 12 Monaten konnte nachgewiesen werden, dass je nach verwendeter Erde bei dem Handschuh aus Naturkautschuk ein durchschnittlicher Gewichtsverlust von 88 % bzw. 99 % auftrat. Im Vergleich dazu fielen die Zahlen bei synthetischen Materialien deutlich geringer aus: Neopren 0–5 %, Nitril 2–13 %, Vinyl 3–22 %. Weitere Studien belegten, dass Faktoren wie UV-Licht, Materialdicke und Temperatur sowie Sauerstoffgehalt einen positiven Einfluss auf die biologische Abbaubarkeit von natürlichem Kautschuk haben können. Zudem ging aus einer Studie hervor, dass die Abbauprodukte von Naturkautschukcondomen bei Wasserorganismen weder chronische noch akut schädigende Wirkungen zeigten.

KAUTSCHUK: EIN NATÜRLICHES MATERIAL ALS NACHHALTIGE LÖSUNG DER KUNSTSTOFFFRAGE

Nicht allein die umweltschädliche Förderung von fossilen Brennstoffen, die auch in der konventionellen Kunststoffherzeugung zum Einsatz kommen, zeigt, dass dringend alternative Materialien zu synthetischen Kunststoffen benötigt werden. Neben der Endlichkeit von Erdöl und seinen Derivaten spielen auch Faktoren wie Gesundheits- und Umweltverträglichkeit sowie CO₂-Bilanz und nachhaltiger Anbau bei dem Naturprodukt Naturkautschuk eine Rolle.

QUELLEN:

Ikram et al. (2000): Biodegradability of NR gloves in soil. *J. Rubb. Res.*, 3(2), 104–114
vitaldoc.lgm.gov.my:8060/vital/access/services/Download/vital1:24027/ARTICLE

Lambert, S., Sinclair, C. J., Bradley, E. L., & Boxall, A. B. (2013). Effects of environmental conditions on latex degradation in aquatic systems. *Science of the total environment*, 447, 225–234.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712016245>
<https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/em/c3em00192j/unauth#!divAbstract>

Lambert, S., Johnson, C., Keller, V. D., Sinclair, C. J., Williams, R. J., & Boxall, A. B. (2013). Do natural rubber latex condoms pose a risk to aquatic systems? *Environmental Science: Processes & Impacts*, 15(12), 2312–2320.
<https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/em/c3em00422h/unauth#!divAbstract>

Function of Carbon Sequestration and Oxygen Release of Rubber Plantations and Its Value Estimation
Jiang Jusheng, Wang Rusong
<https://europepmc.org/abstract/cba/389037>

DIE PERIOD CUP GEBRAUCHSANWEISUNG

HALLO

Wir freuen uns, dass Du Dich für die umweltfreundliche Period Cup von FAIR SQUARED entschieden hast. Sie ist eine weiche Menstruationstasse, hergestellt aus fair gehandeltem Naturkautschuk. Sie wird in die Scheide eingeführt und fängt das Menstruationsblut auf. Die Period Cup ist wiederverwendbar und kann mehrere Jahre genutzt werden. Sie kann ohne Bedenken beim Sport oder Schwimmen, in der Nacht und beim Reisen verwendet werden. Du kannst Deine Menstruationstasse während des gesamten Zyklus tragen, sowohl bei leichten als auch bei starken Blutungen. Sie eignet sich sowohl für junge menstruierende Personen, deren Menstruation gerade begonnen hat, als auch für menstruierende Personen, die schon länger ihre Menstruation haben und solche, die bereits Kinder bekommen haben. Bitte lies Dir die Gebrauchsanweisung vor der ersten Verwendung gründlich durch und bewahre sie auf, sodass Du auch zu einem späteren Zeitpunkt darin nachlesen kannst.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Zu Beginn solltest Du Deine Period Cup etwa 10 Minuten in reichlich Wasser auskochen, um sie zu desinfizieren. Achte darauf, dass genügend Wasser im Topf ist damit die Period Cup nicht beschädigt wird. Sie sollte den Topfboden nicht berühren, du kannst sie z. B. in einen Schneebesen geben. Die Period Cup wird durch leichten Unterdruck und die Kraft der Scheidenmuskulatur in der Scheide gehalten. Es ist wichtig, dass die Löcher in der Period Cup frei sind. Sie helfen den Druck auszugleichen, wenn Du sie herausnehmen willst.

VOR DER VERWENDUNG

Vor jedem Einführen solltest Du Deine Hände mit warmen Wasser und Seife gründlich reinigen. Danach suchst Du Dir eine bequeme Position, um die Period Cup entspannt einführen zu können.

FALTEN


Es gibt unterschiedliche Faltechniken, die das Einführen erleichtern. Für den Anfang ist der C-Fold gut geeignet.



C-Fold



S-Fold

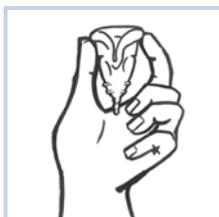

Punch-Down-Fold

EINFÜHREN

Du kannst die Period Cup stehend, sitzend, kniend oder hockend einführen. Hierbei solltest Du Dich entspannen. Das Einführen ist einfacher, wenn diese nass ist. Achte darauf, dass die Period Cup beim Einführen gefaltet bleibt und führe sie sanft in Richtung Rücken ein. Um zu überprüfen, ob sie richtig sitzt. Umfahre hierzu mit einem sauberen Finger die Tasse, um zu tasten, ob diese sich entfaltet hat, oder ziehe – leicht – an den Kugeln: Wenn sie richtig sitzt und sich ein leichter Unterdruck gebildet hat, spürst Du beim Ziehen einen kleinen Widerstand.

POSITION

Die individuell richtige Position der Period Cup wirst Du durch Probieren schnell rausfinden. Manche menstruierende Personen bevorzugen, wenn die Tasse kurz vor dem Muttermund sitzt, anderen reicht die Position weiter vorne am Scheideneingang. Du musst nur darauf achten, dass sie nicht zu nah am Scheideneingang sitzt, da sie sonst beispielsweise beim Sitzen unangenehm ist.

HERAUSNEHMEN

Die Period Cup kann Tag und Nacht getragen werden und kann auch während des Toilettengangs eingeführt bleiben. In der Regel genügt es, wenn Du sie alle 4 bis 12 Stunden entleerst. Die Häufigkeit hängt hierbei von dem Zeitpunkt des Zyklus, der Größe der Tasse und der Stärke der Blutungen ab.

Nach nur wenigen Anwendungen wirst Du schnell ein Gespür dafür entwickeln, wie oft Du Deine Period Cup entleeren solltest. Du kannst sie zunächst in den gleichen Intervallen wie einen Tampon wechseln, um ein besseres Gefühl für die Stärke Deiner Menstruation zu bekommen und um herauszufinden, wie oft Du tatsächlich die Tasse ausleeren musst.

Bevor Du die Period Cup herausnimmst, wasche zunächst Deine Hände mit warmen Wasser und Seife und spüle sie gut ab. **Um die Tasse zu entfernen, musst Du zunächst den leichten Unterdruck ausgleichen, der sie an ihrem Platz hält.** Dieses kannst Du tun, indem Du den Boden der Period Cup zusammendrückst, oder den Finger seitlich der Tasse einführst und sie leicht zur Seite drückst. Danach kannst Du sie vorsichtig aus der Scheide nehmen. Das bewusste Enstpannen der Beckenbodenmuskulatur und das Drehen der Cup kann ebenfalls dabei helfen. Das Herausnehmen der Period Cup ist in einer hockenden Position oder sitzend auf der Toilette am einfachsten. Wenn Du die Period Cup nicht erreichst, dann drücke sie mit dem Beckenbodenmuskel nach unten, bis Du die Unterseite mit den Fingern erreichen kannst. **Hierbei ist es wichtig, dass Du nicht die Kugeln nutzt, um die Period Cup herauszuziehen. Dies kann schmerzhaft sein und schlimmstenfalls sogar gesundheitliche Folgen haben. Du kannst es Dir wie eine Saugglocke vorstellen, die Deine inneren Organe wie die Blase, Gebärmutter etc. nach unten zieht, weil der Unterdruck nicht gelöst wurde.** Das Herausnehmen erfordert etwas Übung. Nimm Dir deshalb gerade am Anfang genug Zeit um das zu üben.

Gieße das Blut nach dem Herausnehmen in die Toilette und spüle die Period Cup aus (siehe Kapitel „REINIGUNG UND PFLEGE“). Danach kannst Du sie wieder einführen.

HINWEIS

Trägst Du zur Verhütung eine Spirale, besprich bitte die Verwendung der Period Cup vorab mit Deine:r Gynäkolog:in.

DIE PERIOD CUP GEBRAUCHSANWEISUNG

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Reinigung und Pflege Deiner Period Cup sind besonders wichtig. Achte beim Reinigen darauf, dass auch die Löcher frei sind. Während der Menstruation reicht das Reinigen mit warmem Wasser und einer milden nicht ölhaltigen Seife. Es ist jedoch wichtig, dass Du alle Seifenreste gründlich abspülst, da diese sonst zu Reizungen in der Scheide führen können. Bei Reisen in Länder, in denen kein Leitungswasser zur Verfügung steht oder verunreinigt sein könnte, ist es wichtig, dass Du für die Reinigung nur Trinkwasser verwendest.

Vor und nach jedem Menstruationszyklus solltest Du Deine Period Cup mit kochendem Wasser desinfizieren. Hierfür kannst Du sie 5 Minuten auskochen (100° C). Achte darauf, dass genügend Wasser im Topf ist, damit die Tasse nicht beschädigt wird. Die Period Cup sollte den Boden des Topfes nicht berühren.

Zur Aufbewahrung der Period Cup eignet sich der beigegefügte Stoffbeutel. Die Menstruationstasse sollte lichtgeschützt, hygienisch und trocken aufbewahrt werden.

KÜRZEN

Sollten die Kugeln des Stiels beim Gehen oder Sitzen schmerzen oder Beschwerden verursachen, so können diese gekürzt werden. Hierfür kannst Du eine oder zwei der Kugeln des Stiels abschneiden. Entferne zunächst die Period Cup aus der Scheide und benutze eine saubere Schere oder Nagelschere, um den Stiel zu kürzen.

Bevor Du die Period Cup wieder einführst, solltest Du diese gründlich reinigen (siehe Kapitel „REINIGUNG UND PFLEGE“). Kürze zunächst nur eine Kugel und probiere dann, ob der Stiel nun nicht mehr aus der Scheide heraussteht. Erst dann solltest Du gegebenenfalls die nächste Kugel abschneiden. Bevor Du den Stiel kürzt, solltest Du im Einführen und Herausnehmen bereits geübt sein, sodass Du nicht zu viel kürzt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Die Period Cup ist aus Naturlatex hergestellt, der in Einzelfällen allergische Reaktionen hervorrufen kann.
- Prüfe vor dem Gebrauch der Period Cup, ob die Löcher unterhalb des Tassenrands offen sind.
- Vor Erstgebrauch ca. 10 Minuten in Wasser auskochen, dabei auf genügend Flüssigkeit im Topf achten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Period Cup dient nicht der Verhütung und sollte nicht während des Geschlechtsverkehrs verwendet werden. Sie schützt nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten.
- Wenn Du ein gynäkologisches Problem hast, solltest Du die Verwendung der Period Cup mit Deine:r Gynäkolog:in besprechen.
- Achte immer darauf, dass Du Deine Hände mit warmem Wasser und Seife wäschst, bevor Du die Period Cup verwendest.
- Trage die Period Cup niemals länger als 12 Stunden, ohne sie gründlich zu reinigen.
- Trägst Du zur Verhütung eine Spirale, besprich bitte die Verwendung der Period Cup vorab mit Deine:r Gynäkolog:in. Bei der Verwendung der Period Cup ist es möglich, dass sich

Deine Hormon- oder Kupferspirale verschiebt. Dies kannst du kontrollieren, indem du nach dem Einführen der Tasse den Rand mit einem Finger entlangfährst und ertastest, ob du den Faden spürst. **Außerdem musst Du unbedingt darauf achten, die Period Cup erst herauszunehmen, wenn Du den Unterdruck gelöst hast** (siehe Abschnitt „HERAUSNEHMEN“). Wenn Deine Spirale Schmerzen verursacht oder sich verschoben zu haben scheint, dann verwende eine alternative Verhütungsmethode (z. B. Kondome) und lass Deine Spirale von eine:r Gynäkolog:in untersuchen.

- Entferne die Period Cup sofort, wenn Du Symptome wie Schmerzen, Hautreizungen, Brennen oder Entzündungen in der Scheide oder im Genitalbereich, oder Schmerzen beim Urinieren hast. Treten ein oder mehrere der genannten Symptome auf, suche dringend eine:n Ärzt:in auf.
- Die Period Cup gehört nicht in die Spülmaschine – es kann zu Materialschäden durch Spülmaschinenreiniger kommen.
- Die Period Cup sollte nicht in Berührung mit ölhaltigen Substanzen kommen.
- Bewahre die Period Cup lichtgeschützt, hygienisch und trocken auf. Der beiliegende Beutel ist ideal dafür geeignet.
- Halte die Period Cup von Kindern und Tieren fern.
- Solltest Du Risse, Bruchstellen oder andere Veränderungen an der Period Cup feststellen, empfehlen wir, sie durch eine Neue zu ersetzen.
- Du solltest Deine Period Cup nicht mit einer anderen Person teilen.
- Mit der Zeit kann sich die Period Cup etwas verfärben. Dies beeinträchtigt ihre Funktion allerdings nicht.
- Die Period Cup darf nicht direkt nach einer Geburt verwendet werden. Zunächst muss nach einer Schwangerschaft der Wochenfluss versiegen.

TOXISCHES SCHOCKSYNDROM (TSS)

Das Toxische Schocksyndrom (TSS) ist ein Infektionssyndrom, das durch ein bestimmtes Bakterium und den von diesem Bakterium produzierten Giften ausgelöst wird. Diese können über offene Wunden und über die Schleimhäute vom Körper aufgenommen werden.

SYMPTOME DES TSS

Es kommt zu hohem Fieber, Ohnmacht, Muskelschmerzen, Herzrasen, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, Benommenheit, Blutdruckabfall, allgemeiner Röte wie bei Sonnenbrand mit anschließender Schuppung der Haut, vor allem an den Fußsohlen und Handflächen.

Wenn eines oder mehrere dieser Symptome während der Periode bei Dir auftreten, entferne die Period Cup sofort und suche eine:n Ärzt:in auf. Weise die Person darauf hin, dass es sich um das TSS handeln könnte. Wenn Du in der Vergangenheit an TSS erkrankt warst, solltest Du die Period Cup nicht verwenden.

FAIR RUBBER

Nicht alle Rohstoffe, die FAIR SQUARED verarbeitet, werden von der Fair Label Organisation e.V (FLO) erfasst. Dafür gibt es einfach zu viele natürliche Rohstoffe. Einer dieser Rohstoffe ist Naturkautschuk (flüssig: Latex), besser bekannt als Gummi. Er wird gewonnen aus dem Saft des tropischen Baumes „Hevea brasiliensis“. Der Verein Fair Rubber e. V. hat sich zum Ziel gesetzt, „einen Beitrag zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Primärerzeuger*innen von Gummi zu leisten, indem er die Prinzipien des fairen Handels auf den Handel mit Gummiprodukten anwendet.“ So steht es in der Satzung. Aber was heißt das? Fair Rubber ist gut für die Menschen. Gerade die Primärproduzent*innen von natürlichem Kautschuk, also die Gummizapfer*innen, die Plantagenarbeiter*innen und die Kleinbäuer*innen, sollen die Möglichkeit haben, am fairen Handel teilzunehmen.

Doch die niedrigen Preise machen es ihnen unmöglich, sich und ihren Familien mit ihrer Arbeit ein auskömmliches Leben zu ermöglichen. Hier setzt der Fair Rubber e. V. an:

Durch das Zahlen einer Fair-Trade-Prämie von 0,50 Euro pro kg Kautschuk Trockenmasse (Dry Rubber Content, DRC) wird soweit wie möglich sichergestellt, dass auch bei niedrigen Weltmarktpreisen die Produktionskosten gedeckt sind. Das Zahlen der Fair-Trade-Prämie gibt den Produzent*innen einen gewissen finanziellen Spielraum, ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wie die Mittel verwendet werden, entscheiden die Produzent*innen selbst: über den Vorstand der Kleinbauernvereinigung oder bei Plantagen von einem Gremium, das aus ausgewählten Belegschaftsvertreter*innen und Delegierten des Managements besteht. www.fairrubber.org

VEGAN SOCIETY

Das Siegel des internationalen Vereins der „The Vegan Society“ findet man hauptsächlich auf Lebensmitteln, Kleidung oder Reinigungsprodukten, aber noch nicht häufig auf Kosmetik. FAIR SQUARED Produkte sind von der englischen Vegan Society zertifiziert und entsprechen ihren Standards.

www.vegansociety.com

Hier ein Auszug der Richtlinien für das Label:

- Tierische Inhaltsstoffe: Der Hersteller und/oder der Produzent des zertifizierten Produktes darf keine Tierprodukte oder tierischen Nebenprodukte in seinem Produkt oder bei der Herstellung des Produktes verwenden.
- Tierversuche: Die Entwicklung und/oder die Herstellung des Produktes darf keine Tierversuche miteinbeziehen oder miteinbezogen haben. Weder im eigenen Namen des Unternehmens noch in dem anderer Parteien, die das Unternehmen kontrollieren.
- Genetisch veränderte Organismen: Die Entwicklung und/oder die Herstellung von genetisch veränderten Organismen darf keine Gene von Tieren oder von Tieren stammende Substanzen miteinbeziehen oder miteinbezogen haben. Produkte, deren Gene verändert wurden, müssen als solche gekennzeichnet werden.

FSC® – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

Der FSC® (Forest Stewardship Council®) setzt sich für die Förderung einer umweltfreundlichen, sozialförderlichen und ökonomisch tragfähigen Bewirtschaftung von Wäldern ein, sodass diese im Sinne der sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnisse heutiger und zukünftiger Generationen genutzt werden und langfristig erhalten bleiben. Das Label stellt sicher, dass entlang der gesamten Wertschöpfungskette nur FSC®-zertifizierte und kontrollierte Materialien verwendet werden.

Für die Herstellung von FSC®-zertifizierten Produkten können die folgenden Materialien eingesetzt werden: FSC®-zertifizierte Mengen, kontrollierte Holzherkünfte oder Recyclingmaterial. Je nach FSC®-Labeltyp ist erkenntlich, ob das Produkt nur aus FSC®-zertifizierter Waldwirtschaft stammt (FSC® 100 %), ausschließlich Recyclingmaterial (FSC® recycled) eingesetzt wurde oder eine Mischung aus zertifizierten und kontrollierten Materialien (FSC® Mix) verwendet wurde. FSC®-zertifizierte Produkte sind gesondert gekennzeichnet. www.fsc-deutschland.de



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



FAIR
SQUARED

FAIR SQUARED GmbH
Hermann-Heinrich-Gossen-Straße 4
D-50858 Köln (Cologne), Germany
Telefon +49 (0) 2234 9 29 66 00

info@fairsquared.com
www.fairsquared.com

@fairsquared_
facebook.com/FairSquared

Für Bestellungen und detaillierte Produkt-
informationen besuchen Sie bitte den Webshop
für Händler. Einmalige Registrierung und
Freischaltung notwendig.

shop.fairsquared.info

ANSPRECHPARTNER IM VERTRIEB:



Stephan Stavridis
stavridis@fairsquared.com
+49 (0) 2234 9 29 66-16



Oliver Gothe
gothe@fairsquared.com
+49 (0) 2234 9 29 66-11